





MANFRED SAUER NL

Das Wesentliche – The Essential – Het Essentiële

Visuele gebruiksaanwijzing van de nieuwe IQ-Cath verpakking van de IQ21, IQ26, IQ36 en IQ60.



De nieuwe milieuvriendelijke verpakking is relatief plat en breed (1). Duw de inkeping in aan de zijkant (2). Vouw de zijkant naar buiten (3) en open de verpakking (4). De katheters zijn nu goed bereikbaar en de verpakking mag rechtop gebruikt worden (5).

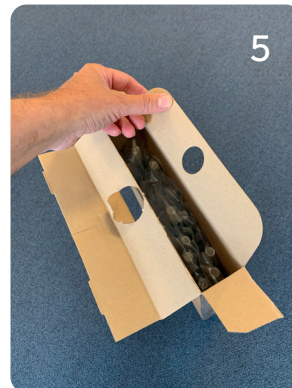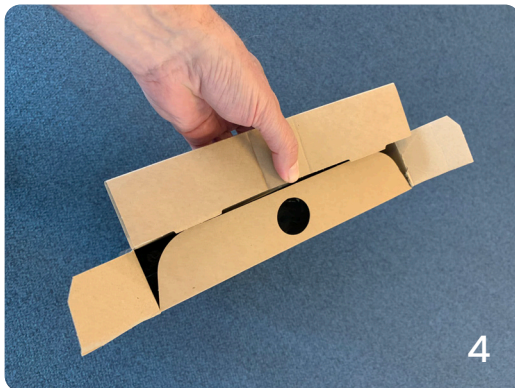

De ronde opening kan worden gebruikt om de verpakking op te hangen (6 en 7). Een haakje moet wel voldoende stevig en breed zijn i.v.m. het gewicht. Natuurlijk kan de verpakking ook compact worden neergezet tegen de wand en zijn de katheters zo hygiënisch uit de verpakking te halen (8).



MANFRED SAUER NL B.V.
Komkleiland 9 · 6666 ME Heteren · Nederland
Tel. +31 (0)24 204 204 9
info@manfred-sauer.nl · www.manfred-sauer.nl

