


# Beenspreider, opblaasbaar

## Gebruiksaanwijzing

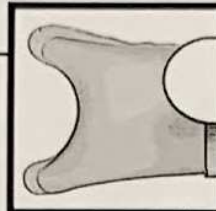


**Hulpmid-  
del voor  
éénmalig  
katheterise-  
ren (CIC)**

Eenvoudig mee te nemen opblaasbaar hulpmiddel voor vrouwen om éénmalig te katheteriseren zonder hulp, speciaal in geval van slappe spieren of spasmen. De beenspreiden spreid te knieën en houdt ze in positie. Beide handen blijven vrij om de katheterisatie uit te voeren.

De opblaasbare beenspreider kan worden uitgebreid met een spiegel. De oogjes op de hoeken kunnen voor aanvullende fixatie worden gebruikt.

De beenspreider is gemaakt van transparante folie en kan om persoonlijke hygiënische redenen onder de douche worden gebruikt. Leeglopenbaar voor eenvoudig transport.

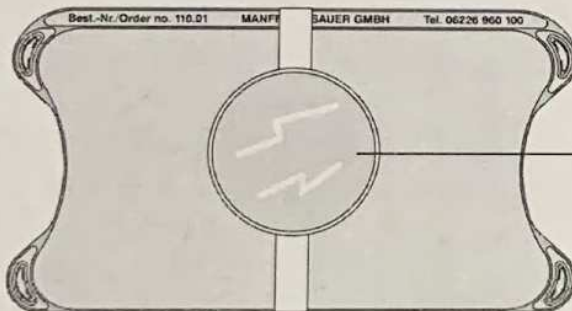


Oogjes voor extra fixatie

Spiegel met klittenband band (moet apart worden besteld)

## Gebruik

Blaas de beenspreider op en sluit het ventiel. Plaats het kussen tussen de dijen direct achter de knieën. Indien noodzakelijk kan met klittenband banden via de oogjes de beenspreider rond de dijen extra zeker worden gefixeerd.

Om leeg te laten lopen het ventieldopje openen en knijp in het lager gelegen gedeelte van het ventiel.

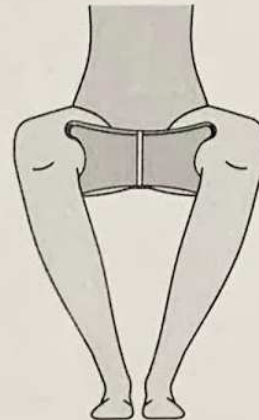

## Reiniging en desinfectie

Voor het schoonmaken gebruik water en zeep, voor het desinfecteren een geschikte oppervlakte desinfectant gebruiken. **Niet** steriliseren met stoom!

**Voor vragen kunt u bellen met onze klantenservice op telefoonnummer 024 - 204 204 9**



MANFRED SAUER NL B.V.  
Kornkleiland 9 • 6866 ME Heteren • Nederland  
Tel. +31 (0)24 204 204 9  
Info@manfred-sauer.nl • www.manfred-sauer.nl

2010-06



MANFRED SAUER GMBH  
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany