


# Penis houder

## Gebruiksaanwijzing

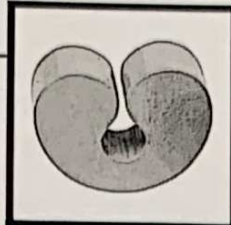

**Hulpmid-  
del voor  
éénmalig  
katheterise-  
ren (CIC)**


Medisch hulpmiddel ter ondersteuning van urethrale katheterisatie bij mannen. Wordt gebruikt om de penis omhoog te houden. Handig in geval van teruggetrokken of slappe penis en voor het terughouden van de voorhuid. Beide handen blijven vrij voor de katheterisatie.

Voor een juiste pasvorm is de penishouder verkrijgbaar in twee maten (2 of 4 cm hoog) en is gemaakt van een zacht huidvriendelijk synthetisch materiaal.

### Gebruik

Houdt de penishouder met beide handen vast. Spreid hem uit en leg hem om de penis zodat de glans op de bovenste rand van de penishouder ligt.

Wanneer u de penishouder loslaat zal deze vanzelf sluiten en de penis in positie houden. Na de katheterisatie kunt u de penishouder openen en verwijderen.

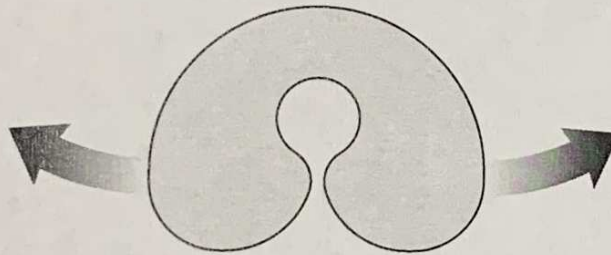

### Schoonmaken en desinfectie

Om de penishouder schoon te maken kunt u water en zeep gebruiken.

De penishouder is een persoonsgebonden medisch hulpmiddel. 1 Houder kan dus niet voor meerdere patiënten/gebruikers tegelijk ingezet worden, ook niet na desinfectie!

**Voor vragen kunt u bellen met onze klantenservice op telefoonnummer 024 - 204 204 9**



MANFRED SAUER NL B.V.  
Kornkleiland 9 • 6666 ME Heteren • Nederland  
Tel. +31 (0)24 204 204 9  
info@manfred-sauer.nl • www.manfred-sauer.nl

2010-11



MANFRED SAUER GMBH  
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany