


Gebruiksaanwijzing

NL


Hydrofielkatheter voor (zelf-)installatie)

- Bestemd voor éénmalig gebruik.
- Niet gebruiken zonder vooraf de coating te activeren met schoon water.
- Na activering moet de katheter zo spoedig mogelijk gebruikt worden.
- De katheter mag niet opnieuw gesteriliseerd worden.
- Aanbevolen gebruikstemperatuur voor gebruik tussen 15–25°C.

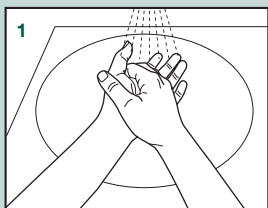


Was uw handen met water en zeep.


Reinig het uiteinde van de penis met een vochtig washandje, wattenbolletje of gaasje.

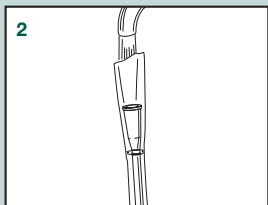


Open de verpakking aan de kant van de connector. Houd de katheter rechtop, vul de verpakking met voldoende schoon water om de gehele katheter gedurende 30 seconden te bevochtigen.

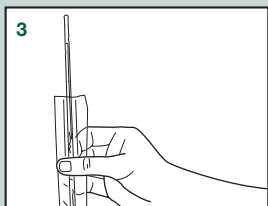

Draai de verpakking om en laat het water uit de verpakking lopen. Open de verpakking aan de voorzijde en maak de kathetertip vrij.

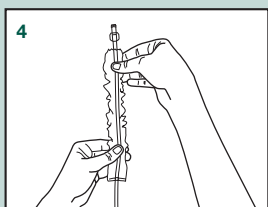

Voer de (zelf-)installatie uit zoals de arts/verpleegkundige u het heeft uitgelegd/aangeleerd.

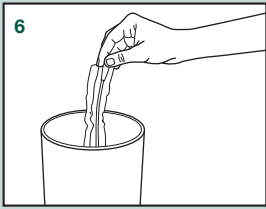

De katheter weggooien volgens de lokale (overheids-)richtlijnen.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website www.manfred-sauer.nl of kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze klantenservice tel. 024 204 204 9.



Droog bewaren



Niet blootstellen aan zonlicht



Volg de gebruiksaanwijzing



Niet voor hergebruik



Niet opnieuw steriliseren



Nietgebruiken als de verpakking beschadigd is

CE 0123

Voldoet aan de EG-Richtlijn 93/42/EWG

STERILE EO

Ethyleen oxide gesteriliseerd

LOT

Lotnummer



Houdbaar tot (jaar-maand)



Stuks

 **MANFRED
SAUER NL**

IQ60 2017-02  0123
MANFRED SAUER GMBH
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany

Komkleiland 9 • 6666 ME Heteren • Nederland
Tel. +31 (0)24 204 204 9
info@manfred-sauer.nl • www.manfred-sauer.nl